

Umetnite testnu trakicu u mjerni uređaj kako biste ga uključili. Odaberite kontrolni mod i istisnite kap kontrolne otopine na čistu površinu. Držite mjerni uređaj tako da testna trakica dodiruje kap kontrolne otopine.

Očekivane vrijednosti

Mjerenje pomoću Wellion LEONARDO kontrolne otopine za ketone trebalo bi dati rezultate unutar očekivanog raspona. Očekivani raspon je prikazan na bočici GALILEO kontrolne otopine za ketone. Ako rezultat bude izvan raspona, provjerite svaki korak Vašeg postupka mjerenja prije provođenja novog mjerenja. Bilo koja pogreška u postupku mjerenja može dovesti do rezultata izvan raspona. Ako rezultati mjerenja pomoću kontrolne otopine nastave davati rezultate izvan raspona, a Vaš postupak mjerenja je ispravan, ponovite mjerenje s testnom trakicom iz neotvorene bočice. Ako očitavanja još uvijek nisu unutar prihvatljivog raspona, molimo Vas da kontaktirate ovlaštenog predstavnika.

OPREZ: AKO NASTAVITE DOBIVATI REZULTATE MJERENJA IZVAN RASPONA PRATEĆI SVE UPUTE, SUSTAV NE RADI ISPRAVNO. NEMOJTE KORISTITI SUSTAV ZA MJERENJE KETONA U KRVI DOK NE DOBIJETE OČITANJE KOJE JE UNUTAR RASPONA.

SYMBOLE / SYMBOLY / SIMBOLI / ΣΥΜΒΟΛΑ / SÍMBOLOS / SIMBOLI / SYMBOLS:



Beachten Sie die Gebrauchsanweisung / Přečtěte si návod k obsluze / Pogledajte navodila za uporabo. / Συμβουλή οδηγιών χρήσης / Consultar instruções de utilização / Pogledajte u uputama za upotrebu / Consult instructions for use



Temperaturbereich / Rozsah teplot / Temperatura omejitve / Όρια θερμοκρασίας / Limites de Temperatura / Raspon temperature / Temperature Limitation



Hersteller / Výrobce / Proizvajalec / Κατασκευαστής / Fabricante / Proizvođač / Manufacturer



In Vitro diagnostisches, medizintechnisches Gerät / Zařízení pro testování In Vitro / In vitro diagnostični medicinski aparat / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro / In vitro dijagnostički medicinski uređaj / In vitro diagnostic medical device



Chargennummer / Číslo šarže / Serija / Κωδικός Παρτίδας / Lote / Serijski broj / Batch code



Verwendbar bis / Spotřebujte do / Χρήση βάσει ημερομηνίας / Uporabno do / Rok valjanosti / Prazo de Validade / Rok valjanosti / Use by



Nicht wiederverwenden / Nepoužívejte opakovaně / Za enkratno uporabo / Μην ξαναχρησιμοποιείτε / Não Reutilizar / Nemojte koristiti više od jednom / Do not reuse



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno / Ne uporabite, če je poškodovana embalaža. / Na μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη / Não utilizar se a embalagem se encontrar danificada / Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno / Do not use if package is damaged



Vor Nässe schützen / Udržujte v suchu / Hraniti v suhem / Διατηρήστε στεγνό / Manter Seco / Čuvati na suhom / Keep dry



Vorsicht, bitte lesen Sie die beiliegenden Dokumente / Upozornění, přečtěte si doprovodné dokumenty / Pozor, pogledajte spremno dokumentaciju. / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα / ATENÇÃO! Consulte os restantes documentos / Pozor, pročitajte priložene dokumente / Caution, consult accompanying documents



Bestellnummer / Katalogové číslo / Kataloška številka / Αριθμός καταλόγου / Referència / Broj artikla / Catalogue number



Direktes Sonnenlicht vermeiden / Nedávejte na přímé slunce / Ne hranite na neposredni sončni svetlobi. / Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως / Manter afastado da luz solar direta / Izbjegavajte izravno sunčevo svjetlo / Keep away from sunlight



MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
7221 Marz
AUSTRIA

CE 0197

© MED TRUST, Wellion and GALILEO are registered trademarks. W11-9SKET RevA 05/2017