

## Test pour drogue en bandelettes et panels

### Introduction

Ce test recherche la présence de drogues d'abus. Veuillez vérifier le code abrégé qui est imprimé sur le sachet du test et le test lui-même (par exemple : COC, THC, KET etc.) et reportez-vous ensuite au tableau de la page suivante où vous trouverez le nom scientifique des drogues, leurs autres noms et le temps de détection approximative. Veuillez noter les méthamphétamines font partie de la famille des drogues Amphétamines et ainsi sera normalement que le test s'avère positif pour l'ecstasy (E). Ce test est rapide, précis et très facile à faire.

### La drogue dans le milieu de travail

Les drogues peuvent affecter le cerveau et le corps d'un certain nombre de façons, ce qui peut influencer sur le rendement de l'employé au travail même si l'abus a lieu en dehors du lieu de travail.

En tant qu'employeur, vous avez le devoir d'assurer autant qu'il est raisonnablement possible que vos employés ne sont pas un danger pour les autres employés ou le grand public en consommant des drogues d'abus.

### Aspects juridiques

Si vous êtes un employeur désireux de tester votre personnel pour les drogues d'abus, il est important que vous avez une politique en place, en avertissement le personnel qu'ils peuvent être soumis à des tests de drogue, et que l'utilisation de drogues sur le lieu de travail ou être sous l'influence de drogues dans le milieu de travail est une infraction qui porte au licenciement. Il est également important que vous vous gardiez à jour sur les dernières mesures gouvernementales.

Si un de vos employés a un problème de drogue, vous devriez faire tous les efforts pour lui/la aider et lui/la encourager à chercher de l'aide professionnelle. Si l'abus de drogues est un problème commun dans votre lieu de travail, il est peut-être dans votre intérêt de commencer un programme de sensibilisation aux drogues pour votre personnel et vos managers.

### Contenu de l'emballage

Sachet contenant le test pour drogue  
Instructions complètes

### Quand dois-je faire le test ?

Ce test peut être fait à tout moment.

Combien de temps faut-il avant que je puisse lire le résultat ?  
Les résultats peuvent être lus en 5 minutes.

### Précautions

- 1 Ce test est pour usage externe seulement.
- 2 N'utilisez pas ce test au-delà de la date d'expiration sur le sachet.
- 3 Utilisez un nouveau test pour chaque échantillon d'urine pour éviter de faux résultats.
- 4 N'utilisez pas ce test si le sachet a été ouvert.

### Quelle est la précision du test ?

Ce test est très précis et les niveaux de sensibilité sont conformes aux normes du SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) aux USA, et aux niveaux recommandés fixés par le National Institute on Drug Abuse (NIDA). Il y a toutefois une possibilité de mauvais résultats dus à l'interférence d'autres substances dans l'urine.

L'une des substances les plus communes qui cause des faux positifs est la codéine, qui se trouve dans une variété de médicaments en vente libre contre la douleur. Ces produits donneront un résultat positif dans un test pour les opiacés / la morphine. Il serait souhaitable de demander aux personnes testées si elles prennent des médicaments aux fins médicales avant que le test soit effectué.



**Fig.1**  
Bandelette test pour une drogue



**Fig.2**  
Panel de test pour une drogue



**Fig.3**  
Panel de test pour plusieurs drogues

En raison de la nature délicate de ce test pour la drogue, vous devez être prudents lors de l'exécution du test pour éviter la contamination et donc un manque de précision dans les résultats du test. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le test.

### Procédure de test

- 1 Enlever le test du sachet (ne pas briser le sceau du sachet jusqu'à ce que vous soyez prêt à commencer le test).
- 2 En utilisant une tasse en plastique, obtenir un échantillon d'urine de la personne qui doit faire le test.
- 3 Si vous avez un panel de test (montré dans la Fig. 2 et Fig. 3 ci-dessus), tirez le capuchon de protection de la partie inférieure du panel pour révéler la/les bandelette/s de test absorbante/es.
- 4 Tremper soigneusement l'extrémité du test avec les lignes ondulées dans l'échantillon d'urine, en veillant à ce que l'urine NE monte PAS au-dessus de la ligne MAX. Sur les bandelettes test (montrés dans la Fig. 1 ci-dessus), la ligne est située juste au-dessus des lignes ondulées ; sur le panel de test, assurez-vous que l'urine ne touche pas le boîtier en plastique.
- 5 Permettre au test d'absorber l'urine pendant 10 à 15 secondes.
- 6 Enlever le test de l'urine, poser la bande de test sur une surface plane et propre alors que les lignes de test se développent.
- 7 Vous pouvez lire les résultats négatifs dès qu'ils apparaissent, mais les résultats positifs doivent être lus au moins 5 minutes après avoir enlevé le test de l'urine. Tous les résultats doivent être lus dans 10 minutes, sinon une fausse lecture peut se produire.

## Test pour drogue en bandelettes et panels

### Introduction

Ce test recherche la présence de drogues d'abus. Veuillez vérifier le code abrégé qui est imprimé sur le sachet du test et le test lui-même (par exemple : COC, THC, KET etc.) et reportez-vous ensuite au tableau de la page suivante où vous trouverez le nom scientifique des drogues, leurs autres noms et le temps de détection approximative. Veuillez noter les méthamphétamines font partie de la famille des drogues Amphétamines et ainsi sera normalement que le test s'avère positif pour l'ecstasy (E). Ce test est rapide, précis et très facile à faire.

### La drogue dans le milieu de travail

Les drogues peuvent affecter le cerveau et le corps d'un certain nombre de façons, ce qui peut influencer sur le rendement de l'employé au travail même si l'abus a lieu en dehors du lieu de travail. En tant qu'employeur, vous avez le devoir d'assurer autant qu'il est raisonnablement possible que vos employés ne sont pas un danger pour les autres employés ou le grand public en consommant des drogues d'abus.

### Aspects juridiques

Si vous êtes un employeur désireux de tester votre personnel pour les drogues d'abus, il est important que vous avez une politique en place, en avertissement le personnel qu'ils peuvent être soumis à des tests de drogue, et que l'utilisation de drogues sur le lieu de travail ou être sous l'influence de drogues dans le milieu de travail est une infraction qui porte au licenciement. Il est également important que vous vous gardiez à jour sur les dernières mesures gouvernementales.

Si un de vos employés a un problème de drogue, vous devriez faire tous les efforts pour lui/la aider et lui/la encourager à chercher de l'aide professionnelle. Si l'abus de drogues est un problème commun dans votre lieu de travail, il est peut-être dans votre intérêt de commencer un programme de sensibilisation aux drogues pour votre personnel et vos managers.

### Contenu de l'emballage

Sachet contenant le test pour drogue  
Instructions complètes

### Quand dois-je faire le test ?

Ce test peut être fait à tout moment.

Combien de temps faut-il avant que je puisse lire le résultat ?  
Les résultats peuvent être lus en 5 minutes.

### Précautions

- 1 Ce test est pour usage externe seulement.
- 2 N'utilisez pas ce test au-delà de la date d'expiration sur le sachet.
- 3 Utilisez un nouveau test pour chaque échantillon d'urine pour éviter de faux résultats.
- 4 N'utilisez pas ce test si le sachet a été ouvert.

### Quelle est la précision du test ?

Ce test est très précis et les niveaux de sensibilité sont conformes aux normes du SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) aux USA, et aux niveaux recommandés fixés par le National Institute on Drug Abuse (NIDA). Il y a toutefois une possibilité de mauvais résultats dus à l'interférence d'autres substances dans l'urine. L'une des substances les plus communes qui cause des faux positifs est la codéine, qui se trouve dans une variété de médicaments en vente libre contre la douleur. Ces produits donneront un résultat positif dans un test pour les opiacés / la morphine. Il serait souhaitable de demander aux personnes testées si elles prennent des médicaments aux fins médicales avant que le test soit effectué.



**Fig.1**  
Bandelette test pour une drogue



**Fig.2**  
Panel de test pour une drogue



**Fig.3**  
Panel de test pour plusieurs drogues


En raison de la nature délicate de ce test pour la drogue, vous devez être prudents lors de l'exécution du test pour éviter la contamination et donc un manque de précision dans les résultats du test. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le test.

### Procédure de test

- 1 Enlever le test du sachet (ne pas briser le sceau du sachet jusqu'à ce que vous soyez prêt à commencer le test).
- 2 En utilisant une tasse en plastique, obtenir un échantillon d'urine de la personne qui doit faire le test.
- 3 Si vous avez un panel de test (montré dans la Fig. 2 et Fig. 3 ci-dessus), tirez le capuchon de protection de la partie inférieure du panel pour révéler la/les bandelette/s de test absorbante/es.
- 4 Tremper soigneusement l'extrémité du test avec les lignes ondulées dans l'échantillon d'urine, en veillant à ce que l'urine NE monte PAS au-dessus de la ligne MAX. Sur les bandelettes test (montrés dans la Fig. 1 ci-dessus), la ligne est située juste au-dessus des lignes ondulées ; sur le panel de test, assurez-vous que l'urine ne touche pas le boîtier en plastique.
- 5 Permettre au test d'absorber l'urine pendant 10 à 15 secondes.
- 6 Enlever le test de l'urine, poser la bande de test sur une surface plane et propre alors que les lignes de test se développent.
- 7 Vous pouvez lire les résultats négatifs dès qu'ils apparaissent, mais les résultats positifs doivent être lus au moins 5 minutes après avoir enlevé le test de l'urine. Tous les résultats doivent être lus dans 10 minutes, sinon une fausse lecture peut se produire.

## Résultats

Lisez les résultats de chaque bandelette individuellement et indépendantes les unes des autres. Quand on regarde le test, vous verrez une ligne de couleur rose/rouge en haut de la fenêtre de test. C'est la ligne de contrôle (C). La ligne suivante, qui peut ou peut pas apparaître en dessous de la ligne de contrôle, est appelée ligne de test (T).

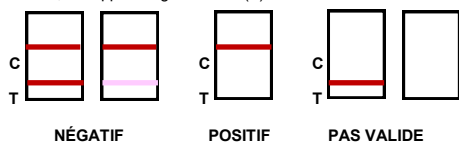

La ligne de contrôle (C) doit apparaître, cela confirme que le test a bien fonctionné. Si aucune ligne de contrôle apparaît, le test n'a pas fonctionné correctement et vous pouvez avoir besoin de faire un autre test. Une deuxième ligne de couleur rose/rouge au-dessous de la ligne de contrôle, n'importe comment faible, devrait maintenant apparaître. Il s'agit d'un résultat négatif. Si aucune nouvelle ligne apparaît en dessous de la ligne de contrôle, alors l'individu a obtenu un résultat positif pour cette drogue d'abus.

\*\*\*L'intensité du couleur de la ligne test (T) n'est pas pertinent ; une deuxième ligne (même si elle est faible) indique un résultat négatif\*\*\*

### TABLEAU DE DROGUES

Nom abrégé	Seuil de test (ng/mL)	Nom scientifique	Outre noms	Présence détectable dans l'organisme pour
6-MAM	10	6-MONOACÉTYLMORPHINE	SMACK, HORSE, JUNK	2-8 heures
AMP	1000	AMPHÉTAMINES	SPEED, BONBON, VITESSE	2-6 jours
BUP	10	BUPRENORPHINE	SUBUTEX	3-6 jours
BZO	300	BENZODIAZÉPINES	BENZO	2-14 jours
CFYL	500	CARFENTANIL	WILDNIL	2-5 jours
COC	100 (bandelettes)	COCAÏNE	COCA, NEIGE, CHARLIE	2-5 jours
COT	200	COTININE	NICOTINE	2-5 jours
EDDP	300	MÉTHADONE	DOLLY, RED ROCK	2-4 jours
FYL	20	FENTANYL	APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8	2-5 jours
K2	50	CANNABIS SYNTHÉTIQUE	BLACK MAMBA, BLISS, BOMBAY BLUE, GÉNIE, ZOHAI, SPICE	1-3 jours
KET	1000	KÉTAMINE	SPÉCIAL K, KETTY	2-5 jours
LSA	20	DIÉTHYLAMIDE DE L'ACIDE LYSERGIQUE	ACIDE, BUVARD, MICRO	1-2 jours
MDMA	500	MÉTHYLÈNEDIOXYMÉTAMPHÉTAMINES	ECSTASE, E, XTC, PILULE	2-6 jours
MET	1000	MÉTAMPHÉTAMINES	ICE, CHALK, METH	2-6 jours
MOP/MOR	300	MORPHINE	OPIACÉS	2-5 jours
OPI	2000	OPIACÉS	SMACK, HORSE, JUNK	2-5 jours
THC	20 (bandelettes) 50 (panels)	CANNABIS	MARI, HERBE, RÉSINE, HASH.	Usage occasionnel 2-14 jours ; usage massif, jusqu'à 30 jours.
TML	100	TRAMADOL	TRAMAL, ULTRAM	1-3 jours

Utilisez le tableau de drogues ci-dessous pour établir à quelles drogues correspondent les codes abrégés. Par exemple, le code "THC" indique le cannabis. Veuillez noter que le test de dépistage des drogues que vous avez acheté ne sera pas efficace pour toutes les drogues figurant dans le tableau ci-dessous ; vous avez besoin de vérifier le code(s) sur le test pour voir quelles drogues sont détectées par votre test.

Que dois-je faire avec les résultats ?

Si vous obtenez un résultat négatif, alors la personne testée n'a aucune des drogues testées dans son corps en ce moment. Vous pouvez re-tester à nouveau dans un mois.

Si vous obtenez un résultat positif, une drogue d'abus a été détectée dans l'urine. Nous vous conseillons vivement d'envoyer l'échantillon à un laboratoire pour avoir une confirmation du résultat.

### Stockage


Ce test doit être stocké entre 2°-30°C, ne pas congeler. Mettre le kit de test à température ambiante avant de procéder au test.

Pour plus de détails :

Home Health (U.K.) Ltd  
+ 44 (0) 1923 711511  
www.homehealth-uk.com

## Résultats

Lisez les résultats de chaque bandelette individuellement et indépendantes les unes des autres. Quand on regarde le test, vous verrez une ligne de couleur rose/rouge en haut de la fenêtre de test. C'est la ligne de contrôle (C). La ligne suivante, qui peut ou peut pas apparaître en dessous de la ligne de contrôle, est appelée ligne de test (T).

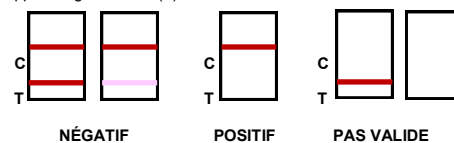

La ligne de contrôle (C) doit apparaître, cela confirme que le test a bien fonctionné.

Si aucune ligne de contrôle apparaît, le test n'a pas fonctionné correctement et vous pouvez avoir besoin de faire un autre test. Une deuxième ligne de couleur rose/rouge au-dessous de la ligne de contrôle, n'importe comment faible, devrait maintenant apparaître. Il s'agit d'un résultat négatif. Si aucune nouvelle ligne apparaît en dessous de la ligne de contrôle, alors l'individu a obtenu un résultat positif pour cette drogue d'abus.

\*\*\*L'intensité du couleur de la ligne test (T) n'est pas pertinent ; une deuxième ligne (même si elle est faible) indique un résultat négatif\*\*\*

### TABLEAU DE DROGUES

Nom abrégé	Seuil de test (ng/mL)	Nom scientifique	Outre noms	Présence détectable dans l'organisme pour
6-MAM	10	6-MONOACÉTYLMORPHINE	SMACK, HORSE, JUNK	2-8 heures
AMP	1000	AMPHÉTAMINES	SPEED, BONBON, VITESSE	2-6 jours
BUP	10	BUPRENORPHINE	SUBUTEX	3-6 jours
BZO	300	BENZODIAZÉPINES	BENZO	2-14 jours
CFYL	500	CARFENTANIL	WILDNIL	2-5 jours
COC	100 (bandelettes)	COCAÏNE	COCA, NEIGE, CHARLIE	2-5 jours
COT	200	COTININE	NICOTINE	2-5 jours
EDDP	300	MÉTHADONE	DOLLY, RED ROCK	2-4 jours
FYL	20	FENTANYL	APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8	2-5 jours
K2	50	CANNABIS SYNTHÉTIQUE	BLACK MAMBA, BLISS, BOMBAY BLUE, GÉNIE, ZOHAI, SPICE	1-3 jours
KET	1000	KÉTAMINE	SPÉCIAL K, KETTY	2-5 jours
LSA	20	DIÉTHYLAMIDE DE L'ACIDE LYSERGIQUE	ACIDE, BUVARD, MICRO	1-2 jours
MDMA	500	MÉTHYLÈNEDIOXYMÉTAMPHÉTAMINES	ECSTASE, E, XTC, PILULE	2-6 jours
MET	1000	MÉTAMPHÉTAMINES	ICE, CHALK, METH	2-6 jours
MOP/MOR	300	MORPHINE	OPIACÉS	2-5 jours
OPI	2000	OPIACÉS	SMACK, HORSE, JUNK	2-5 jours
THC	20 (bandelettes) 50 (panels)	CANNABIS	MARI, HERBE, RÉSINE, HASH.	Usage occasionnel 2-14 jours ; usage massif, jusqu'à 30 jours.
TML	100	TRAMADOL	TRAMAL, ULTRAM	1-3 jours

Utilisez le tableau de drogues ci-dessous pour établir à quelles drogues correspondent les codes abrégés. Par exemple, le code "THC" indique le cannabis. Veuillez noter que le test de dépistage des drogues que vous avez acheté ne sera pas efficace pour toutes les drogues figurant dans le tableau ci-dessous ; vous avez besoin de vérifier le code (s) sur le test pour voir quelles drogues sont détectées par votre test.

Que dois-je faire avec les résultats ?

Si vous obtenez un résultat négatif, alors la personne testée n'a aucune des drogues testées dans son corps en ce moment. Vous pouvez re-tester à nouveau dans un mois.

Si vous obtenez un résultat positif, une drogue d'abus a été détectée dans l'urine. Nous vous conseillons vivement d'envoyer l'échantillon à un laboratoire pour avoir une confirmation du résultat.

### Stockage

Ce test doit être stocké entre 2°-30°C, ne pas congeler. Mettre le kit de test à température ambiante avant de procéder au test.

Pour plus de détails :

Home Health (U.K.) Ltd  
+ 44 (0) 1923 711511  
www.homehealth-uk.com