

time kako se osjećate. [5] Ako Vam ispadne uređaj. [6] Ako ostavite bočicu s testnim trakicama dulje vrijeme otvorenu.

Kemijski sastav

Wellion LEONARDO kontrolna otopina za glukozu je vodena otopina. Sadrži D-glukozu u koncentraciji od:

Razina 0 41 mg/dL
Razina 1 83 mg/dL
Razina 2 153 mg/dL

Također sadrži ublaživače, stabilizator i konzervans kao nereaktivne sastojke. Koncentracija glukoze kalibrirana je pomoću Hitachi Chemistry analizatora te je se u skladu s NIST standardom SRM917C

Upozorenja i mjere opreza

Kontrolna otopina služi isključivo za in vitro dijagnostičku upotrebu. Nije namijenjena za ljudsku konzumaciju ili ubrizgavanje.

Ograničenja

[1] Dobro protresite GALILEO kontrolnu otopinu za glukozu prije upotrebe. [2] NEMOJTE stavljati drugu kap kontrolne otopine na reakcijsku zonu testne trake. [3] NEMOJTE razmazivati kap kontrolne otopine vrhom bočice. [4] Zatvorite bočicu odmah po upotrebi. [5] Koristite isključivo Wellion LEONARDO kontrolnu otopinu za glukozu. [6] Uvijek pro- vjeravajte datum isteka. NEMOJTE koristiti isteklu kontrolnu otopinu.

Skladištenje i rukovanje

[1] Kontrolnu otopinu je potrebno čuvati pri temperatu- rama od 4°C do 30°C. NEMOJTE ZAMRZAVATI ILI HLADITI. [2] Nemojte koristiti poslije datuma isteka. [3] Odbacite neiskorištenu kontrolnu otopinu 90 dana po prvom otvaranju ili poslije datuma isteka.

Mjerenje pomoću kontrolne otopine

Za mjerenje pomoću kontrolne otopine za glukozu potrebno Vam je sljedeće:

Wellion LEONARDO kontrolna otopina za glukozu (Razina 0, Razina 1 ili Razina 2)
Wellion LEONARDO mjerni uređaj i korisničke upute.
Wellion LEONARDO testna trakica za glukozu.

Provedite mjerenje kako slijedi:

Zabilježite datum otvaranja na novootvorenoj bočici. Datum upišite na za to predviđeno mjesto na bočici. Provjerite datum isteka kontrolne otopine kako biste sa sigurnošću utvrdili da nije istekla. Odbacite neiskorištenu kontrolnu otopinu 90 dana po otvaranju ili poslije datuma isteka.

Umetnite testnu trakicu u mjerni uređaj kako biste ga uključili.

Odaberite kontrolni mod i istisnite kap kontrolne otopine na čistu površinu. Držite mjerni uređaj tako da testna trakica dodiruje kap kontrolne otopine.

Očekivane vrijednosti

Mjerenje pomoću Wellion LEONARDO kontrolne otopine za glukozu trebalo bi dati rezultate unutar očekivanog raspona. Očekivani raspon je prikazan na bočici GALILEO testnih trakica za mjerenje glukoze u krvi. Ako rezultat bude izvan raspona, provjerite svaki korak Vašeg postupka mjerenja prije provođenja novog mjerenja. Bilo koja pogreška u postupku mjerenja može dovesti do rezultata izvan raspona. Ako rezultati mjerenja pomoću kontrolne otopine nastave davati rezultate izvan raspona, a Vaš postupak mjerenja je ispravan, ponovite mjerenje s testnom trakicom iz neotvorene bočice. Ako očitavanja još uvijek nisu unutar prihvatljivog raspona, molimo Vas da kontaktirate ovlaštenog predstavnika.

OPREZ: AKO NASTAVITE DOBIVATI REZULTATE MJERENJA IZVAN RASPONA PRATEĆI SVE UPUTE, SUSTAV NE RADI ISPRAVNO. NEMOJTE KORISTITI SUSTAV ZA MJERENJE GLUKOZE U KRVI DOK NE DOBIJETE OČITANJE KOJE JE UNUTAR RASPONA.

SYMBOLS / SYMBOLY / SIMBOLI / ΣΥΜΒΟΛΑ / SÍMBOLOS / SIMBOLI / SYMBOLS:

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung / Přečtěte si návod k obsluze / Poglejte navodila za uporabo. / Συμβουλή οδηγίων χρήσης / Consultar instruções de utilização / Pogleđajte u uputama za upotrebu / Consult instructions for use



Temperaturbereich / Rozsah teplot / Temperatura omejitve / Όρια θερμοκρασίας / Limites de Temperatura / Raspon temperature / Temperature Limitation



Hersteller / Výrobce / Proizvajalec / Κατασκευαστής / Fabricante / Proizvođač / Manufacturer



In Vitro diagnostisches, medizintechnisches Gerät / Zařizení pro testování In Vitro / In vitro diagnostični medicinski aparat/ In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo Médico para Diagnóstico InVitro / In vitro dijagnostički medicinski uređaj / In vitro diagnostic medical device



Chargennummer / Číslo šarže / Serija / Κωδικός Παρτίδας / Lote / Serijski broj / Batch code



Verwendbar bis / Spotřebujte do / Χρήση βάσει ημερομηνίας / Uporabno do / Rok valjanosti / Prazo de Validade / Rok valjanosti / Use by



Nicht wiederverwenden / Nepoužívejte opakovaně / Za enkratno uporabo / Μην ξαναχρησιμοποιείτε / Não Reutilizar / Nemojte koristiti više od jednom / Do not reuse



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno / Ne uporabite, če je poškodavana embalaža. / Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη / Não utilizar se a embalagem se encontrar danificada / Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno / Do not use if package is damaged



Vor Nässe schützen / Udržujte v suchu / Hraniti v suhem / Διατηρήστε στεγνό / Manter Seco / Čuvati na suhom / Keep dry



Vorsicht, bitte lesen Sie die beiliegenden Dokumente / Upozornění, přečtěte si doprovodné dokumenty / Pozor, pogledjte spremno dokumentacija. / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα / ATENÇÃO! Consulte os restantes documentos / Pozor, pročítajte příložené dokumente / Caution, consult accompanying documents



Bestellnummer / Katalogové číslo / Kataloška številka / Αριθμός καταλόγου / Referència / Broj artikla / Catalogue number



Direktes Sonnenlicht vermeiden / Nedávejte na přímé slunce / Ne hranite na neposredni sončni svetlobi. / Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως / Manter afastado da luz solar direta / Izbjegavajte izravno sunčevo svjetlo / Keep away from sunlight



MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
7221 Marz
AUSTRIA

CE 0197

© MED TRUST, Wellion and GALILEO are registered trademarks. W11-95GLU RevA 05/2017