

TEST D'OVULATION DE TYPE BANDELETTE – CE 0123

Ce test détecte la présence d'hormones LH (Luteinising Hormone) dans les urines.


Avant de commencer :

1. Lire complètement les instructions avant de commencer.
2. Se munir d'une montre ou d'un chronomètre.

Effectuer le test :

1. Prélever un échantillon d'urine dans un récipient plastique (gobelet).
2. Retirer la bandelette de test de son emballage. Ne pas déballer la bandelette de test avant d'effectuer le test.
3. Placer la bandelette verticalement dans l'échantillon d'urine pendant environ 10 secondes. S'assurer que les flèches dessinées sur la bandelette sont orientées vers le bas. Ne pas tremper la bandelette au-delà de la ligne de niveau maximum.
4. Retirer la bandelette de l'échantillon d'urine et la poser sur une surface plane et propre. Une bande de couleur rouge pâle doit commencer à apparaître sur la bandelette.
5. Pour un résultat optimal, il est recommandé d'attendre 10 minutes. Ne pas lire les résultats après 30 minutes.

Résultats

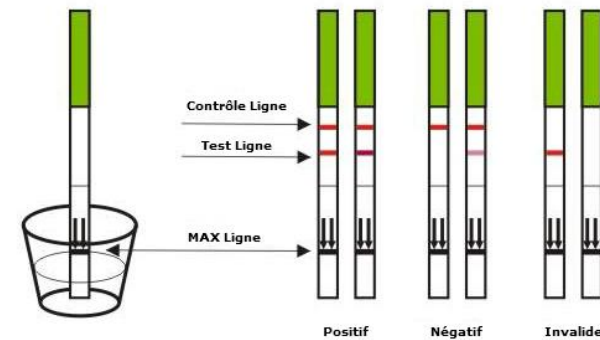

Positif pour surtension L.H.

Si deux bandes de couleur sont visibles et la ligne de test est d'une intensité de couleur à peu près égale ou supérieure (plus sombre) que la ligne de contrôle, il s'agit d'un résultat positif et une bonne indication que le pic de LH est en cours. Vous devriez ovuler dans les 24-36 prochaines heures. Les rapports sexuels est conseillé à tout moment après le premier test positif.

Résultat negative

Si deux lignes sont visibles est que la ligne de test est invisible ou présente une couleur plus claire que celle de la ligne témoin, le résultat est négatif et que le taux d'hormones LH est normal ou proche de la normale. Il est nécessaire de poursuivre le test les jours suivants.

Résultat invalide

Si la ligne témoin n'apparaît pas après 5 minutes, le résultat est invalide. La présence de la ligne témoin est indispensable à une détermination correcte des résultats.



Manufactured by: AI DE Diagnostic Co. Ltd., 141 Zhu Zhou Road, Qingdao High-Tech Industrial Park, 266101 Shandong, P.R. China

EC REP SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany
Distributed in the UK by Home Health UK Ltd Tel: 01923 711 511, Website: www.homehealth-uk.com, Email info@homehealth-uk.com